

# Instruções Uso Arti-Brux® Quick

# Bausch

## Fabricante:

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG  
Oskar-Schindler-Str. 4  
50769 Cologne- Germany

Telefone: +49 221 70936-0  
E-Mail: info@bauschdental.de  
Internet: www.bauschdental.de



Fabricante



Siga as instruções do fabricante



Rotulagem de conformidade



uso único

## Produto:

Arti-Brux® Quick  
Tinta indicadora de oclusão - BK88

**REF**

## Conteúdo:

- Pincel de uso único
- Quantidade 0,15 ml

## Descrição geral e finalidade do produto médico

Arti-Brux® Quick é um verniz vermelho para aplicação com um pincel descartável nas superfícies oclusais de restaurações, próteses e placas rígidas. Arti-Brux® Quick forma uma película fina e uniforme após a secagem. A película de verniz é projetada para uma aplicação (até o máximo de 24 horas). O verniz resistente à dissolução pela saliva é passível de ser abrasionada pelos contatos com os dentes (superfícies oclusais). Arti-Brux® Quick evidencia contatos e marcas do movimento dos dentes por meio da remoção da camada de verniz.

## Produto para exclusivo uso profissional.

## Indicação

Arti-Brux® Quick BK 88 é indicado para:

- Controle de oclusão dinâmica em restaurações, peças protéticas e placas oclusais rígidas.
- Verificação de oclusão a curto prazo (até 24 horas no máximo) - Oclusograma
- Visualização de trincas e desajuste marginal em restaurações diretas e prótese fixas.

## Contra indicação

Arti-Brux® Quick consiste, em parte, de álcool concentrado (etanol 96%). Para pacientes alcoólatras, gestantes e crianças, Arti-Brux® Quick não deve ser usado de forma intra-oral. Da mesma forma, qualquer contato com mucosas lesionadas na área da boca deve ser evitada.

O Arti-Brux® Quick não deve ser utilizado em pacientes com alergias ao iodo.

Arti-Brux® Quick não deve ser aplicado em dentina exposta ou preparos.

## Efeitos colaterais

Resinas sub-polimerizadas ou mesmo placas termoformadas com diferentes termoplásticos podem causar descoloração.

No caso de superfícies não limpas ou jateadas, a tinta pode penetrar em microfissuras nas superfícies de resina ou cerâmica, causando alteração de cor.

Ao aplicar o Arti-Brux® Quick nos dentes, a tinta pode infiltrar-se em fissuras ou selar as bordas das mesmas e causar manchas temporárias ou permanentes.

Após um período mais longo de utilização de Arti-Brux® Quick (mais que 24 horas) pode ocorrer alteração de cor da saliva; a película de tinta é fabricada em uma resina natural e um corante alimentício vermelho e após o uso, a boca deve ser enxaguada com água.

## Aplicação

- Limpe cuidadosamente e seque com cuidado as superfícies a serem testadas
- Aplique a tinta nas superfícies oclusais a serem testadas.
- Para controlar o bruxismo, especialmente o bruxismo do sono, o paciente deve usar a placa durante à noite, colocando-a imediatamente antes de deitar.

## Efeito / diagnóstico

Após a conclusão do período de teste, verifique as superfícies testadas.

A camada de verniz é removida pelos contatos dos dentes (superfícies oclusais). Esses padrões de contato servem para controlar os contatos oclusais de modo estático e dinâmico.

Desgaste uniforme em placas de mordida, por exemplo, é um indicador de que está uniformemente distribuído. Abrasão unilateral pesada indica sobrecarga (por exemplo, bruxismo) ou com ajuste inadequado. Para restaurações protéticas, o mesmo se aplica.

## Limpeza

Após a verificação, remova a camada de tinta das superfícies.

Auxíliam nesta remoção: escova dental e creme dental adequado, imersão em álcool ou uso de lenço de papel umedecido em álcool. A camada de verniz dissolve-se bem com álcool concentrado (etanol 96%). As restaurações protéticas podem ser limpas com uma escova dental ou equipamento profissional para a profilaxia.

## Descarte

O Arti-Brux® Quick é constituído por um corante alimentício vermelho e uma resina natural, também aprovada para aplicações alimentícias e farmacêuticas. Todos os componentes do conjunto podem ser descartados com o lixo hospitalar habitual.

## Notificação de incidentes

Nota: Os acontecimentos adversos graves relacionados com o produto devem ser comunicados ao fabricante e autoridade competente.

## Arti-Brux® Quick

